

## Durchführung der Rundversuche POCT/INR mit dem Messgerät MICROPOINT qLabs

Zur Testdurchführung ist nötig:

- Nicht mitgeliefert:

MICROPOINT qLabs Messgerät

MICROPOINT qLabs PT-INR-Teststreifen

- Mitgeliefert:

1x Fläschchen Rundversuchsprobe (gebrauchsfertig)

Die Rundversuchsprobe ist bis zur Durchführung des Tests bei **+18°C bis +30°C** zu lagern!  
(Nicht einfrieren, nicht übermäßiger Hitze aussetzen)

Die Messung muss innerhalb von 15 Tagen nach dem Öffnen der Rundversuchsprobe durchgeführt werden.

### Durchführung:

1. Legen Sie den PT-INR-Teststreifen in das Messgerät ein (das Messgerät schaltet sich automatisch ein).
2. Geben Sie die Zahlenkombination der Rundversuchsprobe ein, sobald Sie das Messgerät dazu auffordert - die Zahlenkombination finden Sie auf dem Etikett der Rundversuchsprobe.
3. Wenn Sie das Messgerät auffordert, die Probe aufzutragen (blinkender Tropfen und 120 Sekunden Countdown), schwenken Sie die Rundversuchsprobe mehrmals und tragen Sie einen Tropfen auf den Teststreifen auf.
4. Notieren Sie den angezeigten INR-Wert im Ergebnisprotokoll zur Übermittlung an die ÖQUASTA.